



La Lipoplastía RF más segura

© 2010-2015 ★ StarLipo. All rights reserved

RF = Radio-Frecuencia

150 kHz - 4MHz

El procedimiento StarLipo
consiste en la aplicación
transoperatoria de energía de
RF filtrada y acondicionada
para producir retracción
cutánea postoperatoria.

El efecto de retracción cutánea comienza inmediatamente después de la aplicación de RF. El efecto máximo se logra a los 6 meses del postoperatorio.

El procedimiento StarLipo
está indicado en todos los
casos de liposucción primaria
para minimizar la flaccidez
postoperatoria.

En la mayoría de los casos de mini-abdominoplastía, se puede ofrecer un procedimiento StarLipo como una alternativa menos agresiva.

CONTRAINDICACIONES:

- 1) Enfermedad por “modelantes”
- 2) Liposucción secundaria
- 3) Fibrosis significativa ú otra patología en el área operatoria propuesta



StarLipo antenna



**Antena de Radio-Frecuencia Monopolar
con circuito acondicionador de RF de
estado sólido interconstruido**



La energía RF filtrada y
acondicionada se libera
exclusivamente por la punta

Nunca use la antena StarLipo
para el tunelizado
subcutáneo como si fuera
una cánula de metal porque
se daña. La StarLipo es un
aparato delicado de alta
tecnología

Técnica de StarLipo

1) Marcaje Preoperatorio

2) Efectúe la liposucción completa con técnica tumescente, tunelizando con cánulas metálicas



3) Finalmente, utilice la Antena de Radio-Frecuencia Monopolar (StarLipo) para retraer la piel


1) Marcaje preoperatorio:
dibuje túneles de 2 cm de
ancho siguiendo un patrón en
abanico




2) Efectúe la liposucción
completa con técnica
tumesciente

Nunca use la antena StarLipo
para el tunelizado
subcutáneo como si fuera
una cánula de metal porque
se daña. La StarLipo es un
aparato delicado de alta
tecnología

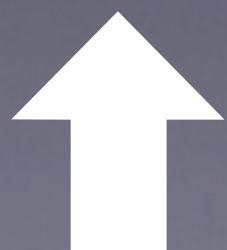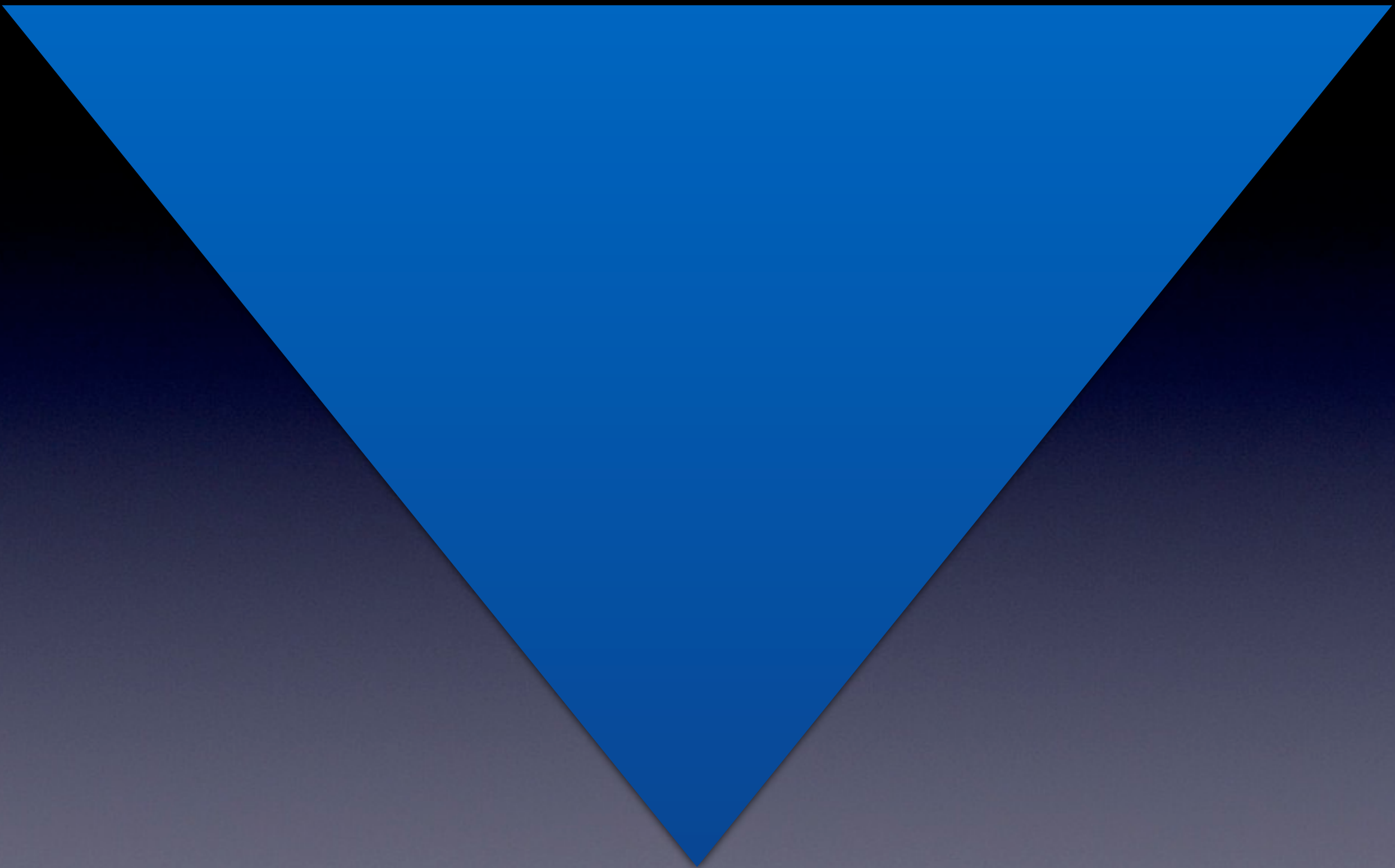

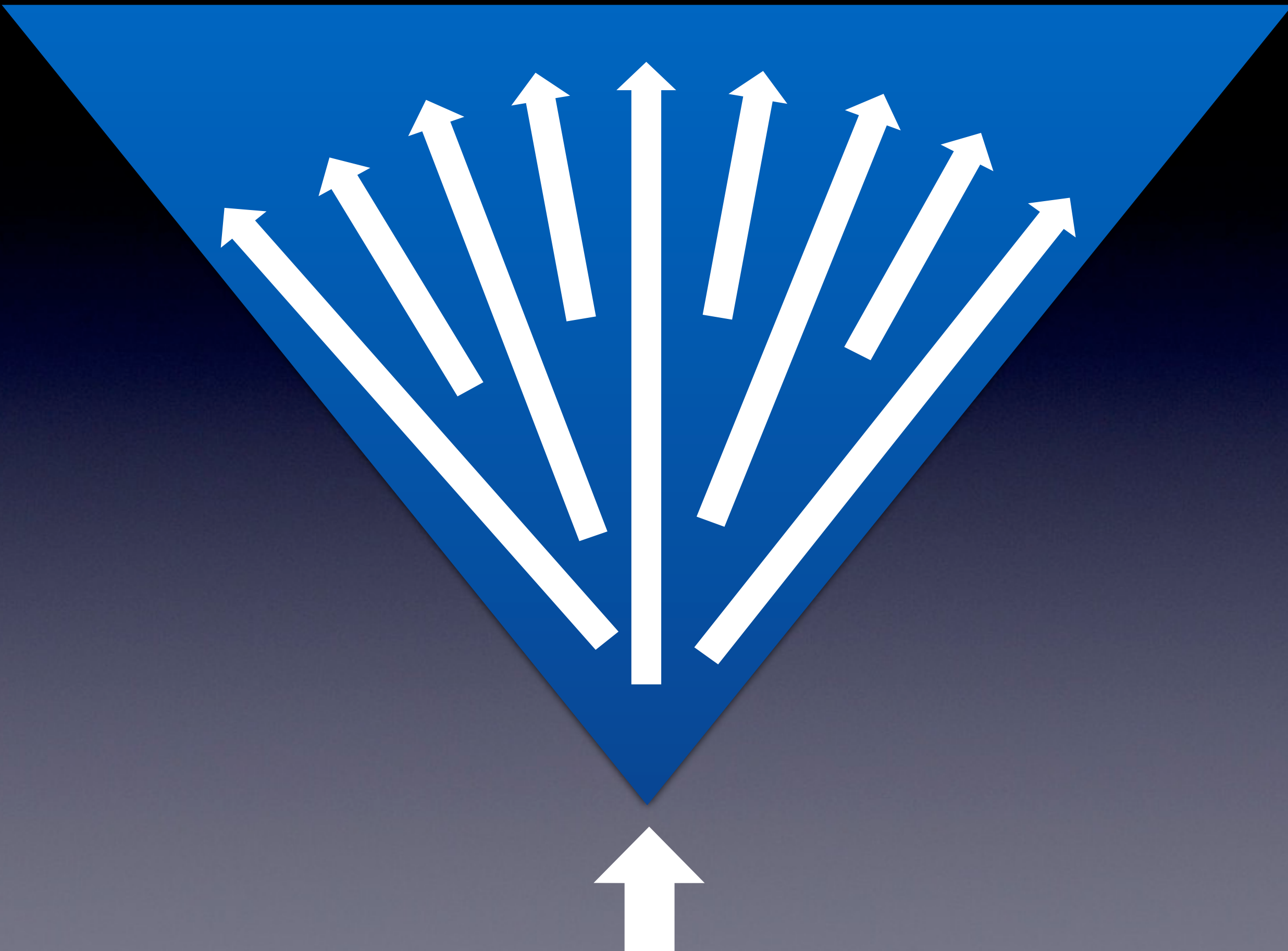

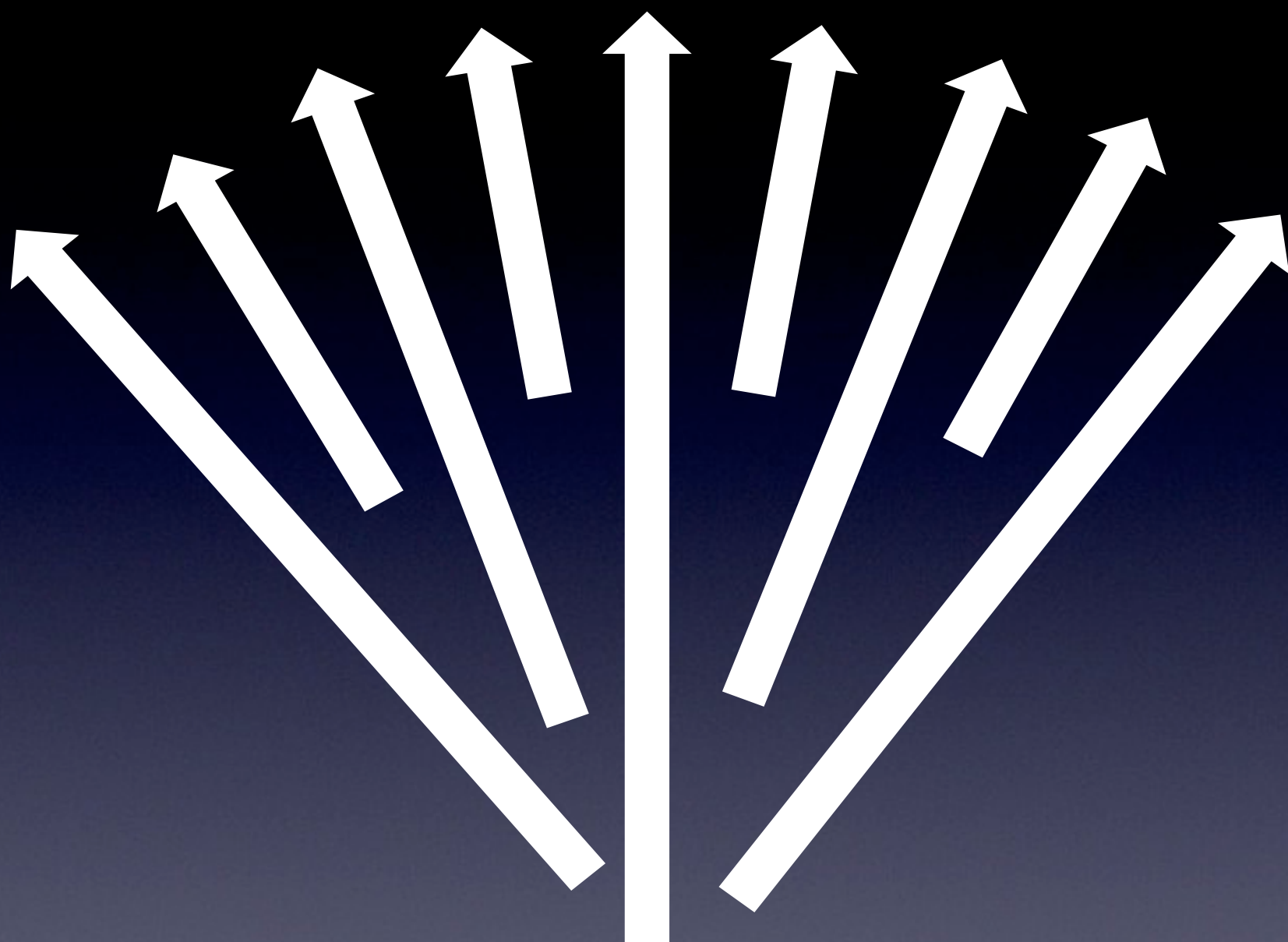



Ya que la liposucción
esté totalmente
terminada, proceder
con la aplicación de
energía de RF

3) Utilice la Antena de Radio-
Frecuencia Monopolar
(StarLipo)

Conexiones




Ponga el
Electrocauterio
en modo
Coagulación, a
30 Watts de
salida



Asegúrese de
que el
electrodo de
retorno este
bien fijo al
paciente



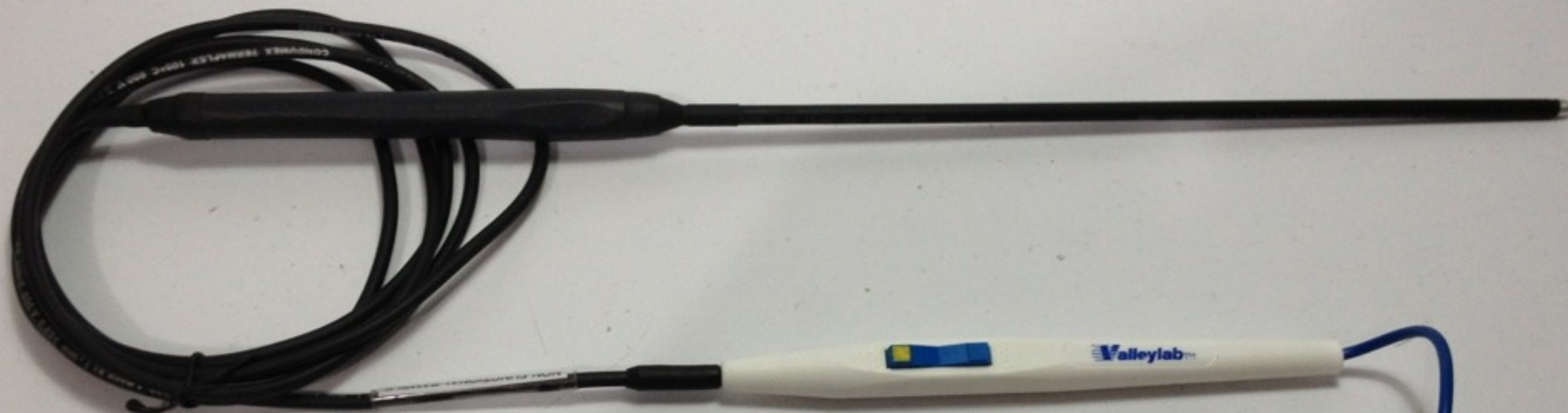



Aplicación de energía de Radio-frecuencia


1) Inserte la StarLipo por la misma incisión de la liposucción








2) Presione el switch “COAG” del mango ó preferiblemente el switch de pedal del electrocauterio y lentamente vaya extrayendo la StarLipo a una velocidad de 2 cm por segundo



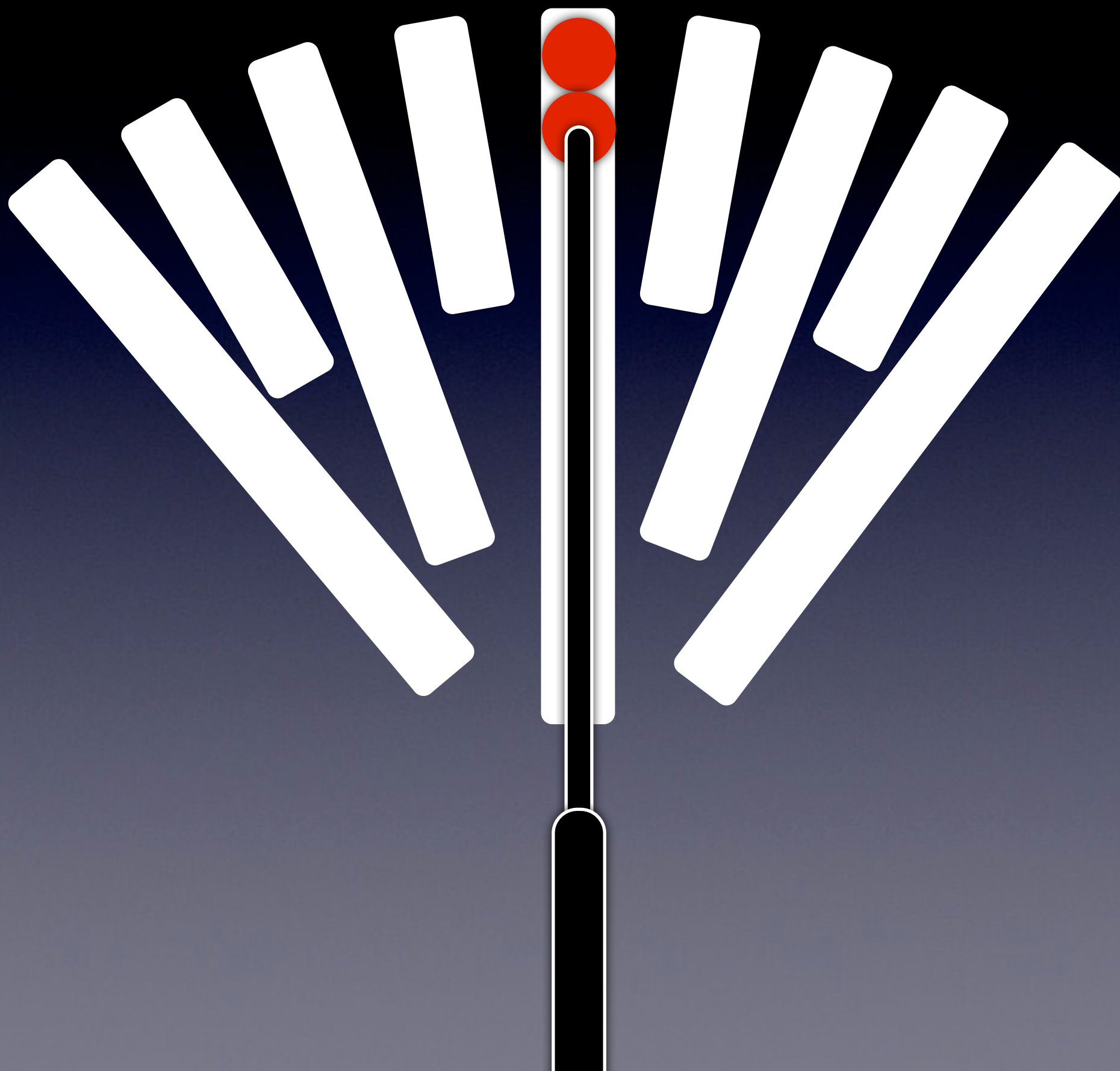


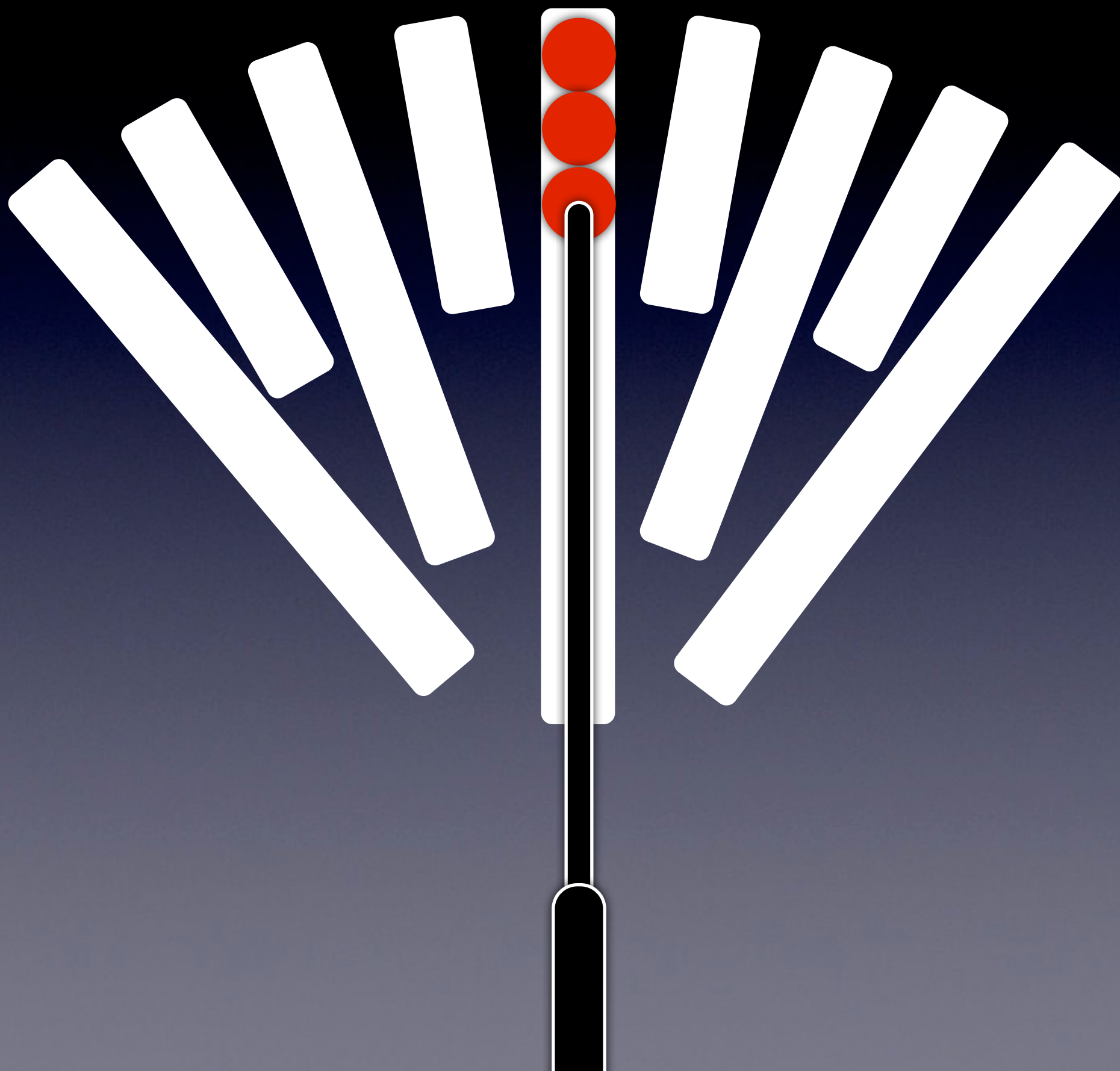

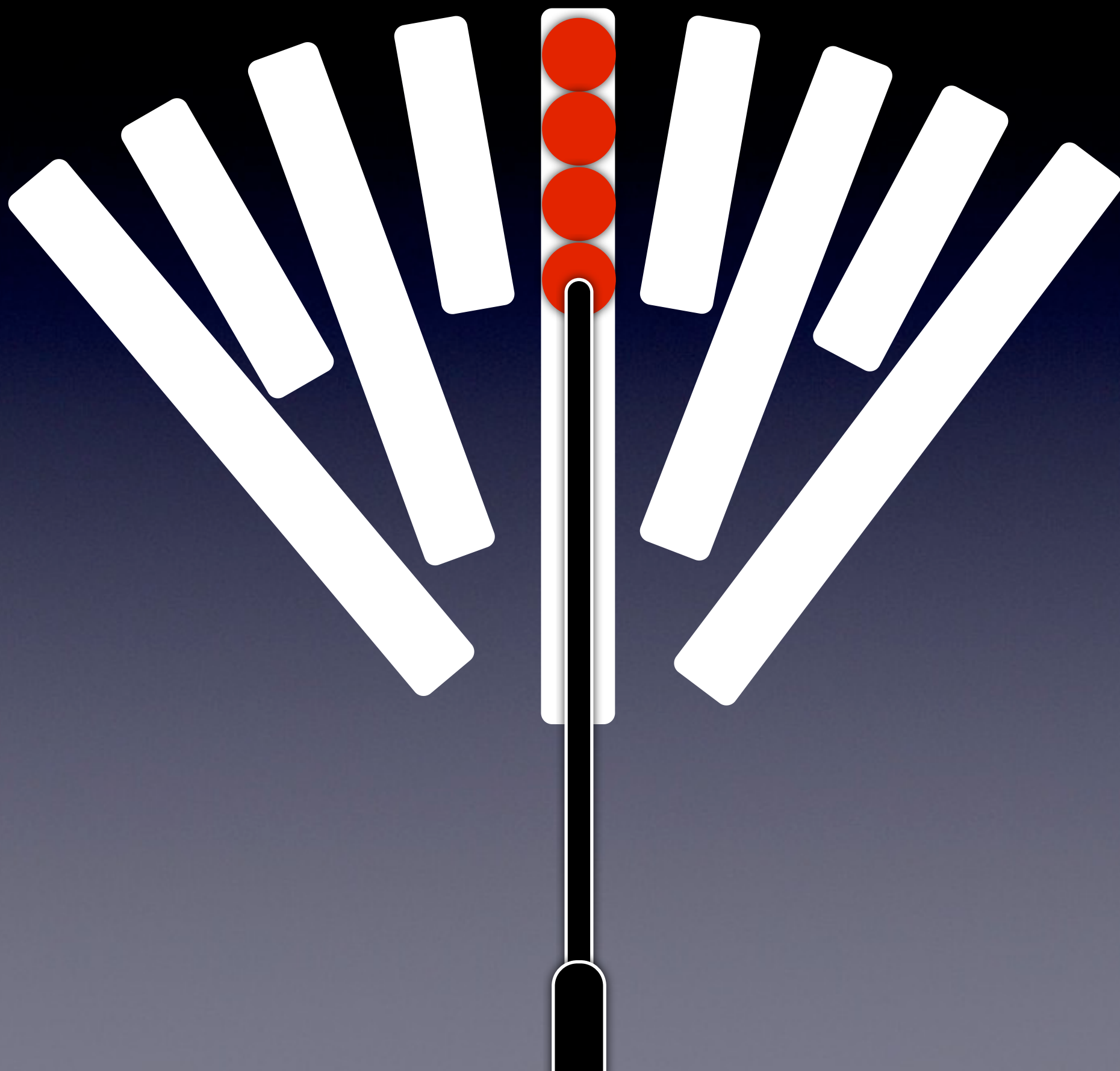


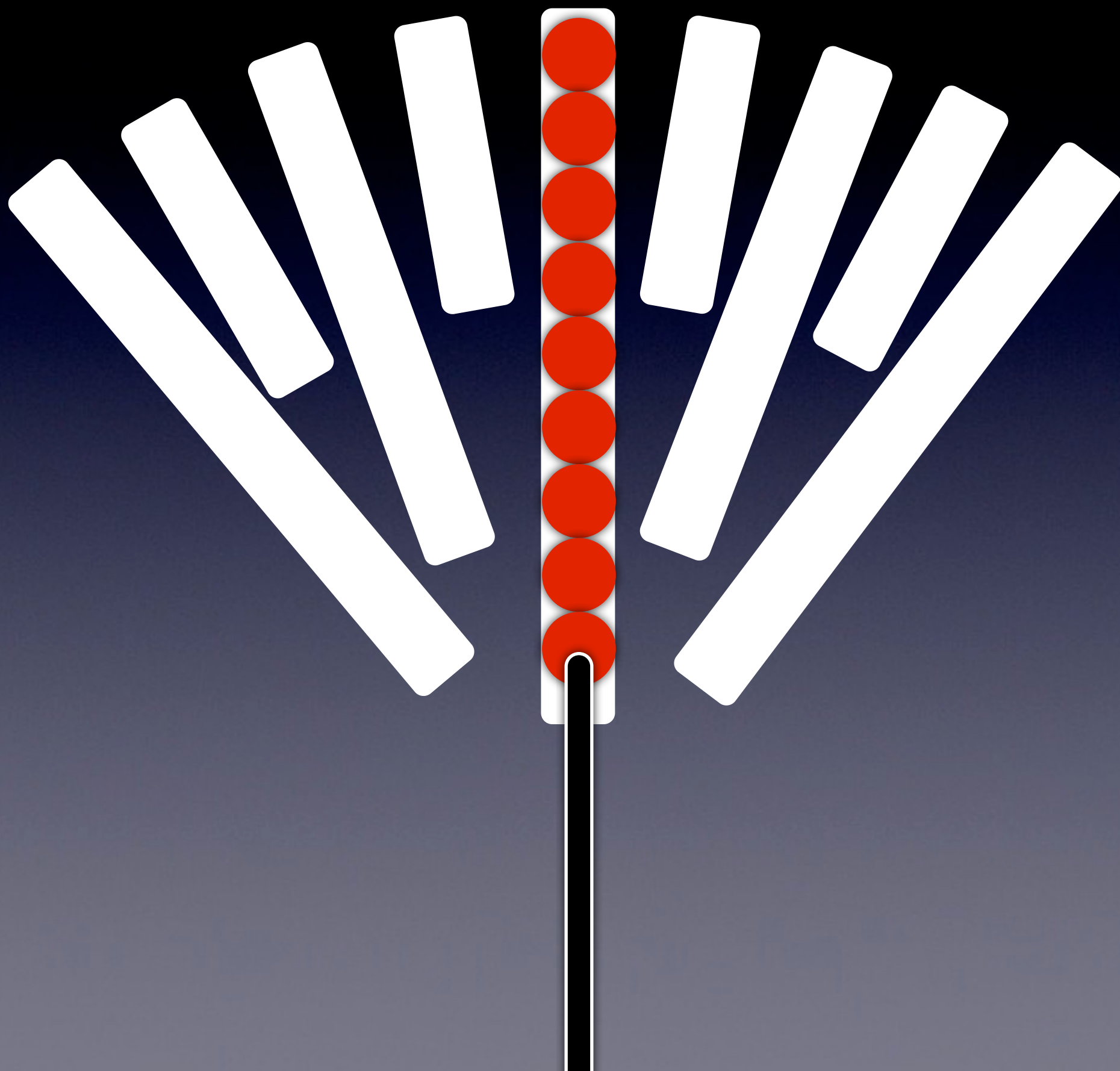

3) Deje de presionar el switch del electrocauterio antes de retirar completamente la StarLipo por la incisión de liposucción

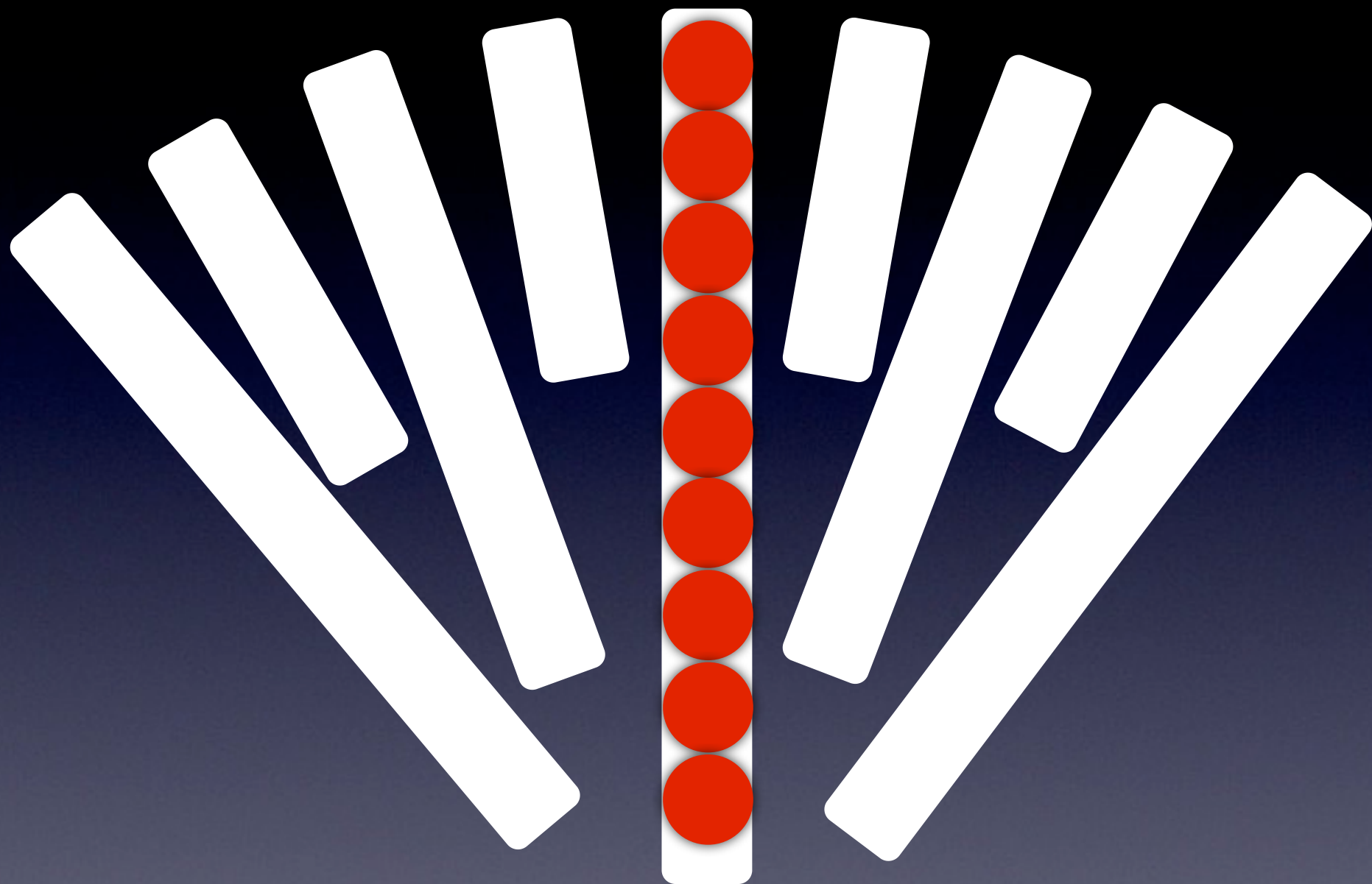

4) Repita esta misma secuencia para el resto del área. Una sola pasada por túnel es suficiente

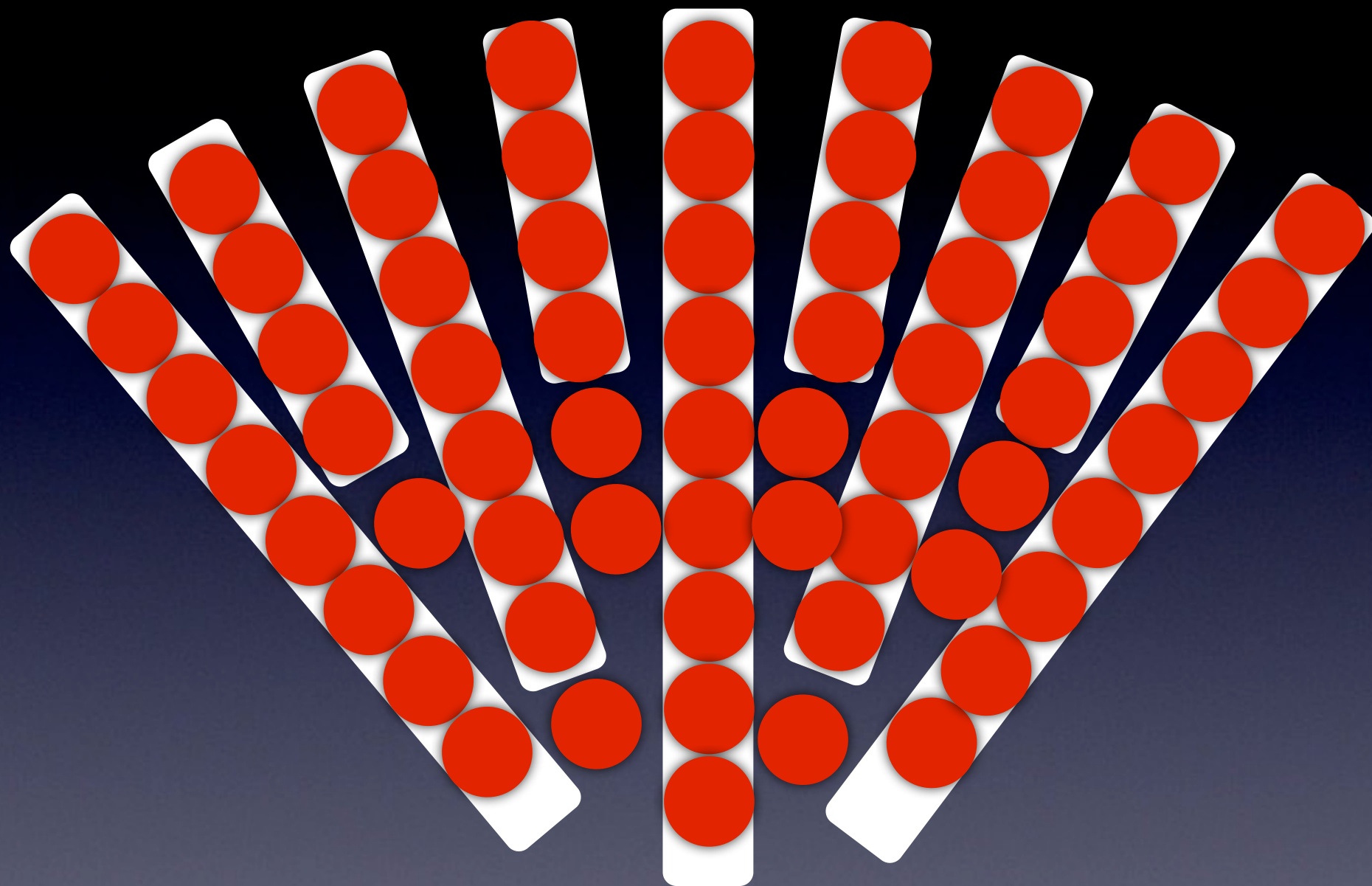

El efecto de retracción cutánea comienza inmediatamente después de la aplicación de RF. El efecto máximo se logra a los 6 meses del postoperatorio.

El efecto inicial de retracción cutánea se puede ver durante la cirugía. Para fines comparativos, ya se completó un lado con StarLipo



★ StarLipo

No hay quemaduras cutáneas

Dosis precisa de RF

Ligera y portátil

No requiere mantenimiento

Muy fácil de usar



StarLipo

Retracción cutánea confiable

Compatible

Técnica muy fácil de aprender

Baja costos de cirugía

Tecnología de Miniaturización

FDA Class 1

“Ready to use in clinical settings”

StarLipo es un aparato de alta tecnología y debe manejarse con delicadeza.

No use la StarLipo si se encuentran dañados el cable o la cubierta aislante



La Lipoplastía RF más segura

© 2010-2015 ★ StarLipo. All rights reserved